

# Инструкции по применению

## Назначение

Система компрессионных чулок с круговым вязанием для компрессии нижних конечностей, в основном для лечения заболеваний венозной системы.

## Показания

- Лечение варикозной язвы (Международная классификация хронических заболеваний вен нижних конечностей C6)
- Лечение смешанной (артериально и венозно обусловленной) язвы нижних конечностей (с учетом противопоказаний)
- Профилактика рецидива варикозной язвы (Международная классификация хронических заболеваний вен нижних конечностей C5)

## Противопоказания

- Прогрессирующая облитерация периферийных артерий (если имеет место один из следующих параметров: ЛПИ < 0,5, давление в лодыжечной артерии < 60 мм рт. ст., давление в пальцах ног < 30 мм рт. ст. или транскутанное парциальное давление кислорода < 20 мм рт. ст. на тыльной части стопы)
- Декомпенсированная сердечная недостаточность (Нью-Йоркская кардиологическая ассоциация III + IV)
- Септический флебит
- Синяя болевая флегмазия

## Особое внимание при

- выраженных влажных дерматозах;
- непереносимости компрессионного материала;
- тяжелых нарушениях чувствительности конечностей;
- прогрессирующей периферийной полиневропатии (напр., при сахарном диабете);

- ревматоидном полиартрите.

## Целевая группа пациентов

К предполагаемым пользователям относятся представители медицинских профессий и пациенты, в том числе лица, оказывающие помощь в уходе, после соответствующего обучения представителями медицинских профессий. Представители медицинских профессий под собственную ответственность на основании доступных мер/величин и необходимых функций/показаний оказывают медицинскую помощь взрослым и детям с учетом информации производителя.

## Использование по назначению

Правильное измерение является предпосылкой оптимального лечения. При этом размер лодыжки (сВ) определяет выбираемый размер. Путем выполнения измерения под коленом (сD) выбор размера подтверждается.

Контакт с химическими веществами (напр., бензолы, метанола, салициловая кислота в высокой концентрации) может негативно сказаться на компрессионном действии изделия. При использовании компрессионных чулок следует отказаться от применения мазей и масел.

Если во время ношения чулок появляются боли или усиливается раздражение кожи, незамедлительно снимите чулок и проконсультируйтесь со своим врачом или обслуживающим медицинским персоналом.

Не допускать прямого контакта материала чулка с раной. Необходимо проводить ежедневный осмотр кожи.

Во время продолжительных фаз неподвижности надевать нужно только один чулок.

Для обеспечения безопасного использования нижний чулок mediven ulcer следует стирать не реже одного раза в 2-3 дня.

#### **Комплект поставки**

- 2 mediven ulcer
- 1 mediven ulcer plus
- 1 измерительная лента
- 1 приспособления для надевания для mediven ulcer plus с открытым мыском

#### **Хранение**

##### **Рекомендация по ношению**

Если врачом не предписано иное, носите Ваш компрессионный чулок mediven для достижения оптимального результата лечения ежедневно с утра до вечера. Нижний чулок mediven ulcer можно также использовать ночью или во время неактивных фаз.

#### **Надевание без использования Butler**

##### **Надевание mediven ulcer без использования medi Butler**

- Соберите или сверните чулок до пятки.
- Надевайте соответствующую часть чулка на стопу, пока маркировка размера не будет находиться на пятке и тыльной части стопы.
- Теперь, не перекручивая, натяните чулок без образования складок на лодыжку, икру до колена, при этом натягивание определяет длину чулка.
- Затем проверьте точность прилегания и отсутствие складок. Следите за тем, чтобы цветная маркировка находилась посередине пятки.

##### **Надевание mediven ulcer plus без использования medi Butler**

- Соберите или сверните чулок до пятки
- Надевайте соответствующую часть чулка на стопу, пока маркировка

размера не будет находиться на пятке и тыльной части стопы.

- Теперь, не перекручивая, натяните чулок без образования складок на лодыжку, икру до колена, при этом натягивание определяет длину чулка.

Следите за тем, чтобы манжеты обоих чулок находились друг над другом, а также за отсутствием складок на мысках чулок.

#### **Надевание с использованием Butler** **Надевание mediven ulcer с использованием длинной ручки medi Butler**

- Надевайте mediven ulcer на дугу для маркировки medi Butler, пока цветная маркировка не появится над краем дуги.
- Продвигайте ногу в чулок, пока не достанете до пола, и твердо станьте на нее.
- Теперь с помощью ручек натяните чулок вверх до середины голени. Затем извлеките medi Butler по направлению назад.
- Равномерно натягивайте чулок вверх до подколенной области, при этом натягивание определяет длину чулка.
- Затем проверьте точность прилегания и отсутствие складок. Следите за тем, чтобы цветная маркировка находилась посередине пятки.

##### **Надевание mediven ulcer plus с использованием medi Butler**

- Надевайте mediven ulcer на дугу для надевания medi Butler, пока цветная маркировка не появится над краем дуги.
- Продвигайте ногу в чулок, пока не достанете до пола, и твердо станьте на нее.
- Теперь с помощью ручек натяните чулок вверх до середины голени. Затем извлеките medi Butler по направлению назад.
- Равномерно натягивайте чулок вверх до подколенной области, при этом

натягивание определяет длину чулка.


- Теперь натяните чулок вверх до колена, при этом натягивание определяет длину чулка.


Следите за тем, чтобы манжеты обоих чулок находились друг над другом, а также за отсутствием складок на мысках чулок.


### Рекламации

В случае рекламаций, связанных с изделием, таких как повреждение ткани или дефекты посадки, обращайтесь, пожалуйста, непосредственно к своему дилеру, поставляющему медицинские изделия. Производителя, а также компетентный орган государства-члена ЕС необходимо информировать только о серьезных случаях, которые могут привести к значительному ухудшению состояния здоровья или смерти. Определение серьезных случаев содержится в арт. 2 № 65 Регламента (ЕС) 2017/745 (РМИ)

### Пояснение символов

 Символ медицинского изделия (Medical Device)

 Символ Single Patient – multiple use → изделие предназначено для многократного использования одним пациентом

 Символ UDI (Unique Device Identifier)