

medi Classic/medi Jeans





Knieruhigstellungsschiene

Knee immobilisation brace

Orthèse de repos

Ortesis inmovilizadora de rodilla

Gebrauchsanweisung. Instructions for use. Mode d'emploi. Instrucciones de uso.
Instruções para aplicação. Istruzioni per l'uso. Gebruiksaanwijzing. Brugsvejledning.
Bruksanvisning. Návod k použití. Uputa za uporabu. Инструкция по использованию.
Kullanma kılavuzu. Instrukcja zakładania. Οδηγία εφαρμογής. Інструкція з використання.

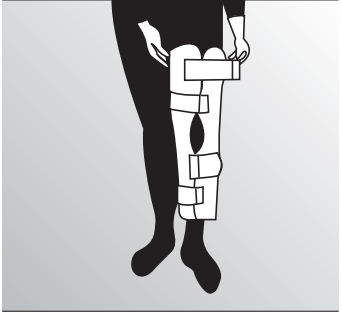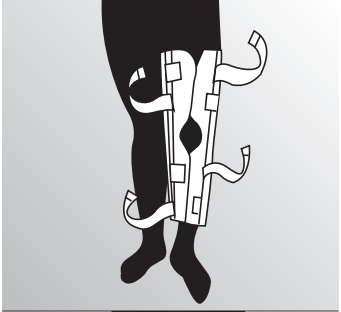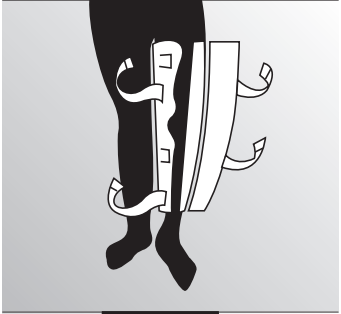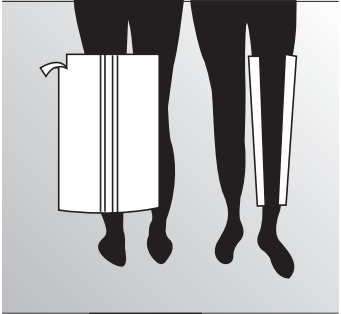

medi Classic/ medi Jeans

Назначение

medi Classic / medi Jeans представляет собой ортез для иммобилизации колена. Изделие необходимо применять исключительно для ортезного лечения колена; оно предназначено только для использования при отсутствии повреждений на коже.

Показания

- Послеоперационная иммобилизация
- Боль перед операцией
- Вывих надколенника
- Иммобилизация после повреждения связок коленного сустава

Противопоказания

- Тромбоз глубоких вен голени и бедра

Рекомендации по применению

Расположите шину так, чтобы вырез располагался над надколенником.

Важные замечания

Иногда может возникнуть боль в области голени в течение первых нескольких часов использования. Если интенсивность боли значительно уменьшится в течение 24 часов, Вы должны связаться со своим лечащим врачом. Вы также должны связаться с доктором в случае возникновения внезапной боли, отека, потери чувствительности, при ощущении холода в нижней конечности, а также при посинении пальцев ноги. В ожидании дальнейших указаний доктора следует ослабить ленты с застежками-липучками и обеспечить конечности полный покой.

Рекомендации по надеванию

- Расстегните все застежки-липучки на фиксирующих лентах и расположите

шину так, чтобы вырез располагался над надколенником. Внимание: Для обеспечения правильного положения на ноге шины medi Classic длину окружности изделия можно уменьшить или увеличить за счет изменения положения частей, закрепляемых застежкой-липучкой.

- Боковые ребра жесткости при необходимости можно изогнуть.
- Оберните боковые части шины вокруг ноги таким образом, чтобы коленная чашечка осталась открытой.
- Сначала застегните ленты, фиксирующие шину на бедре, затем ленты, фиксирующие на голени. Затем застегните ленты около надколенника.

Рекомендации по уходу

Перед стиркой застегните застежки-липучки и удалите шарнирные шины. Остатки мыла могут вызвать раздражение кожи и способствовать износу материала.

- Стирайте изделие вручную предпочтительно с использованием моющего средства medi clean.
- Не отбеливать.
- Сушите на воздухе.
- Не гладьте.
- Не подвергать химической чистке.



Инструкция по хранению

Хранить в сухом месте, защищать от прямого попадания солнечных лучей.

Материалы

алюминий, хлопок, ПУ, полиэстер

Гарантия

в объемах, предусмотренных законодательством, действующим на территории страны-импортера.

Утилизация

Изделие можно утилизировать вместе с бытовыми отходами.